

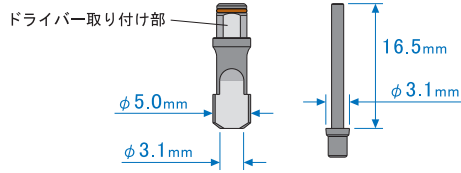


使用ツール

SB1-MKボーンミル

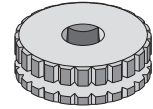


SB2-MKボーンミル

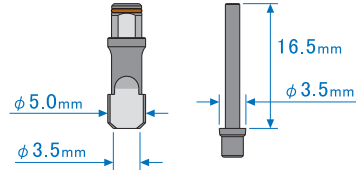


スクエア・ハンドドライバー

対応 フィクスチャー	F37**	TF37**	F46**
	F40**	TF40**	
		TF43**	

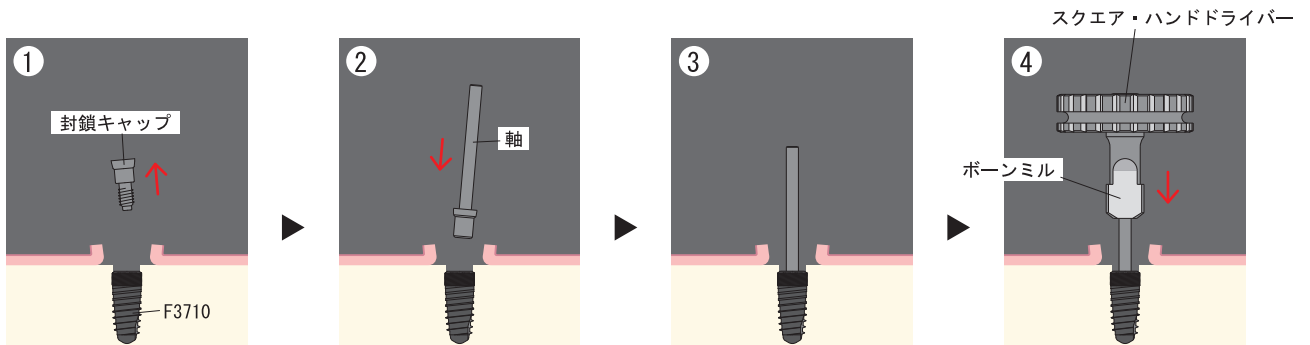

- ① フィクスチャーから封鎖キャップを外します。
 - ②～③ 「軸」をフィクスチャーに取り付けます。
 - ④ 予め「ボーンミル」に「スクエア・ハンドドライバー」を取り付け、軸に差し込みます。
- ※「軸」はフィクスチャーに押し込むことで、テーパ嵌合し安定します。

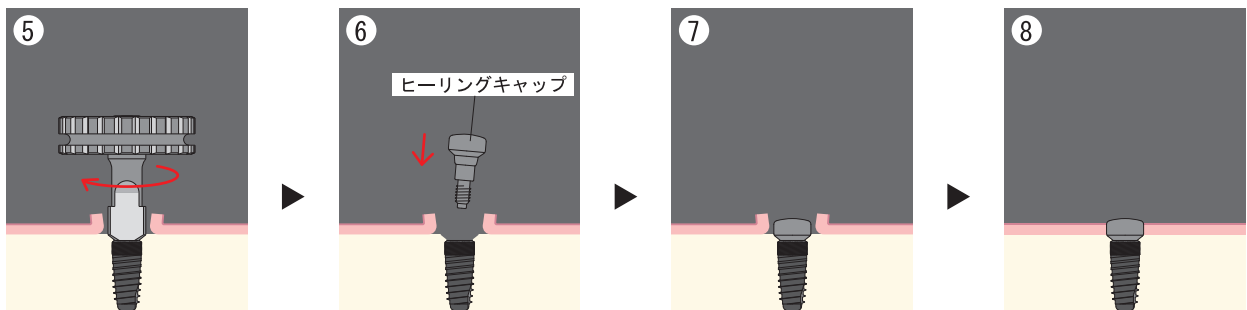

- ⑤ 「ボーンミル」を押さえつけながら回転させ、骨を削除します。
- ⑥～⑧ 「ボーンミル」を取り外し、ヒーリングキャップを取り付けます。